

MANUEL D'UTILISATION

Version R0514

POSTE DE PHLÉBOTOMISTE ÉLECTRIQUE 3500E

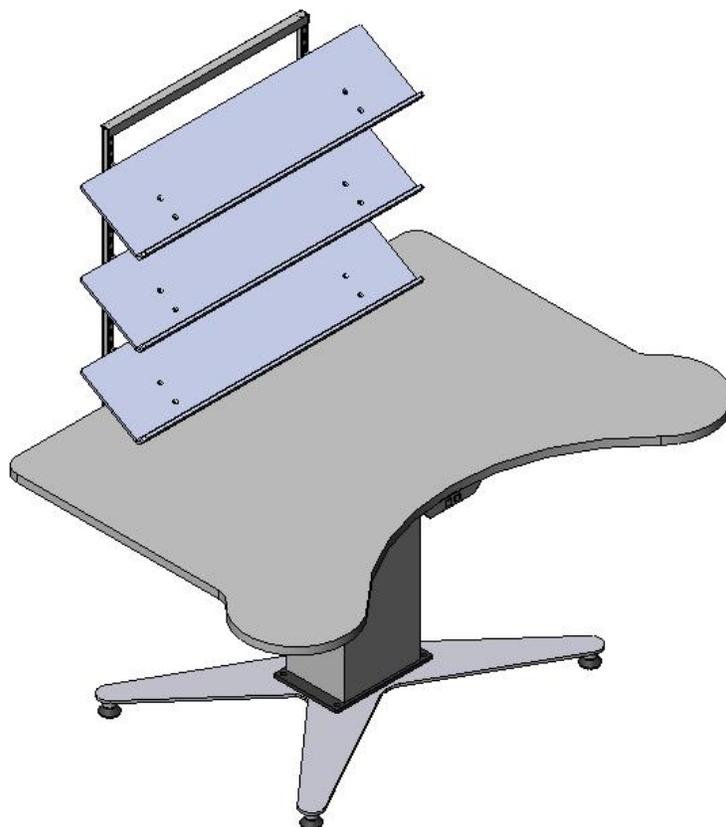


TABLE DES MATIÈRES

1	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
2	GARANTIE	4
3	POUR NOUS REJOINDRE	5
4	UTILISATION	6
4.1	Hauteur ajustable	6
4.2	Tablettes.....	6
4.3	Batterie rechargeable	6
5	SPÉCIFICATIONS DU POSTE DE PHLÉBOTOMISTE	7
6	NETTOYAGE	8
7	ENTRETIEN SUGGÉRÉ.....	9
8	LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE	10

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Bien lire les consignes de sécurité avant d'utiliser les produits IBIOM. Toute personne qui travaille avec les produits IBIOM doit avoir accès à cette information.



AVERTISSEMENT – NE JAMAIS S'ASSEOIR SUR LA SURFACE DE TRAVAIL

S'ASSEOIR SUR LA SURFACE DE TRAVAIL PEUT FAIRE BASCULER LE POSTE.



AVERTISSEMENT - ENTRETIEN

Toujours débrancher la colonne électrique avant d'effectuer les tâches de nettoyage et d'entretien.

2 GARANTIE

IBIOM Instruments Ltée garantit ses produits contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période **d'un an** à partir de la date d'achat. En cas de défaut, toute réparation sera effectuée sans frais. Cette garantie ne s'applique pas aux produits et composants qui doivent être remplacés après une usure normale ou à la suite de la négligence, de l'abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les instructions et mises en garde présentées dans ce guide. De même, elle ne s'applique pas aux appareils ayant subis des modifications ou réparations effectuées par un réparateur autre que ceux autorisés par IBIOM Instruments Ltée.

Toute réparation effectuée sur les produits IBIOM une fois la garantie terminée seront facturée aux tarifs réguliers de l'entreprise.



3 POUR NOUS REJOINDRE

Avant de nous rejoindre, veuillez avoir en main l'information suivante.

- **Numéro de série** du poste de phlébotomiste (l'étiquette du numéro de série se trouve sous la surface de travail).

Pour nous rejoindre :



Téléphone 450-678-5468



Fax 450-445-9837



Courriel info@ibiom.com

Site Internet www.ibiom.com



Adresse IBIOM Intruments Ltée
1065, rue du Pacifique, suite 403
Sherbrooke, Québec
J1H 2G3
Canada

4 UTILISATION


4.1 Hauteur ajustable

- Utilisez les boutons de contrôle pour ajuster la hauteur du poste.



4.2 Tablettes

- L'angle des tablettes peut être ajusté de 45° to 90° et l'espacement des tablettes peut être ajusté selon vos besoins.

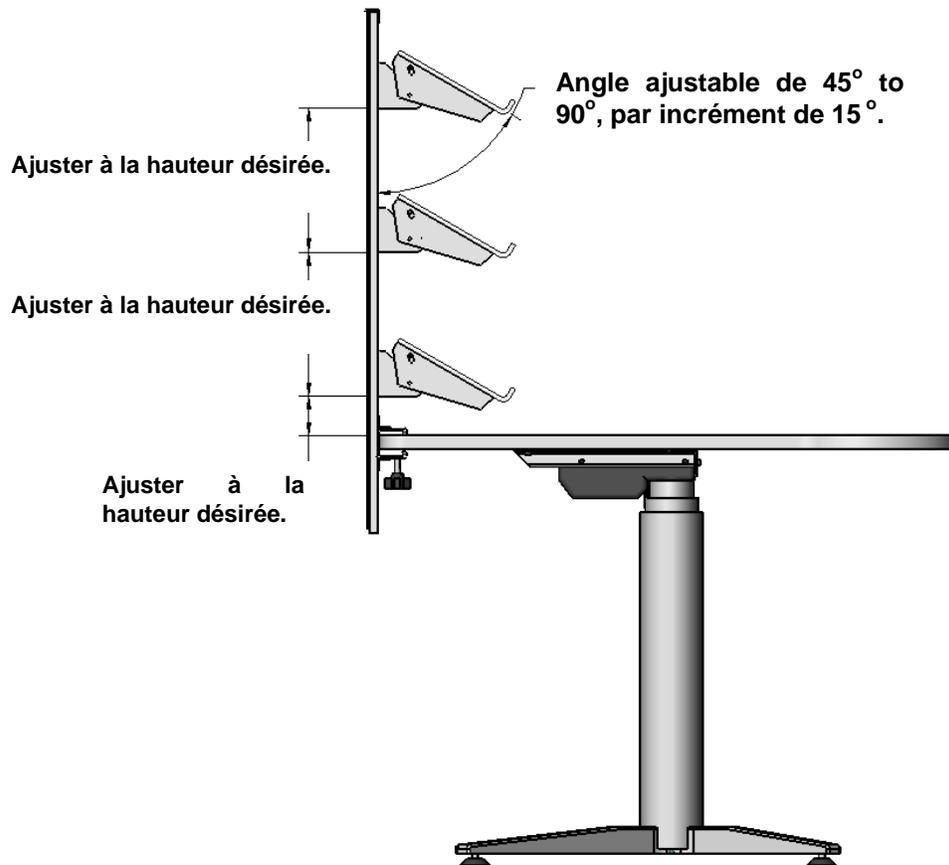

4.3 Batterie rechargeable

- La batterie est livrée rechargée à pleine capacité.
- Après chaque journée d'utilisation, assurez-vous de recharger la batterie pour une période de 8 heures. Il suffit de brancher l'alimentation électrique au mur.
- Si la batterie n'est pas utilisée à chaque jour, assurez-vous de la recharger selon les besoins.

5 SPÉCIFICATIONS DU POSTE DE PHLÉBOTOMISTE

Dimensions:

- Surface de travail : 32" x 44" (81 cm. x 112 cm.). Autres dimensions sur mesure disponibles.
- Hauteur ajustable : 22.5" à 34.5" (57 cm. à 88 cm.), à l'aide d'un moteur silencieux.
- Trois tablettes ajustables (position et angle). Certains modèles ne possèdent pas de tablette.

Mouvements:

- Contrôles: boutons pour ajuster la hauteur.

Avantages et autres caractéristiques:

- Poste de travail pour gaucher ou droitier.
- Design arrondie avec rebord en caoutchouc.
- Espace pour contenant à aiguilles.
- Fabriqué et assemblé au Canada.

6 NETTOYAGE

Produits recommandés pour le nettoyage:

- Désinfectant contenant de l'hypochlorite de sodium (produit javellisant) dilué dans un ratio de 1:10;
- Désinfectant contenant du peroxyde d'hydrogène à une concentration maximale de 0.5%.

Toujours s'assurer de bien rincer la surface de travail après le nettoyage.

Tout dommage causé par l'utilisation d'un produit différent de ceux mentionnés dans cette section ou à une concentration différente n'est pas couvert par la garantie.


7 ENTRETIEN SUGGÉRÉ

Il est recommandé d'effectuer certaines tâches d'entretien pour assurer un bon fonctionnement durant plusieurs années. Avant d'effectuer ces tâches, veuillez vous lire les consignes de sécurité présentées au début du présent guide.

Tâche	Description	Fréquence		
		Hebdomadaire	Semi-annuelle	Annuelle
Nettoyage	Le poste de phlébotomiste IBIOM doit être nettoyé régulièrement afin d'enlever la poussière et les débris.	X		
Inspection des pièces mobiles.	Toutes les pièces mobiles doivent être inspectées pour détecter les possibles bris ou l'usure de ces pièces. Par exemple, il faut inspecter le produit pour détecter des fissures, des composantes manquantes ou tout dommage visible.		X	
Inspection des composantes électriques.	Les composantes électriques doivent être inspectées aux points d'attachement des câbles, des fils et des prises pour y détecter tout dommage.		X	
Test d'opération.	Effectuez un test d'opération en faisant monter et descendre complètement le poste de phlébotomiste pour détecter tout dommage (bruit, pièces brisées, pièces manquantes...).			X

En cas de problème ou pour toutes questions sur l'utilisation du poste de phlébotomiste, veuillez communiquer avec nous.

8 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

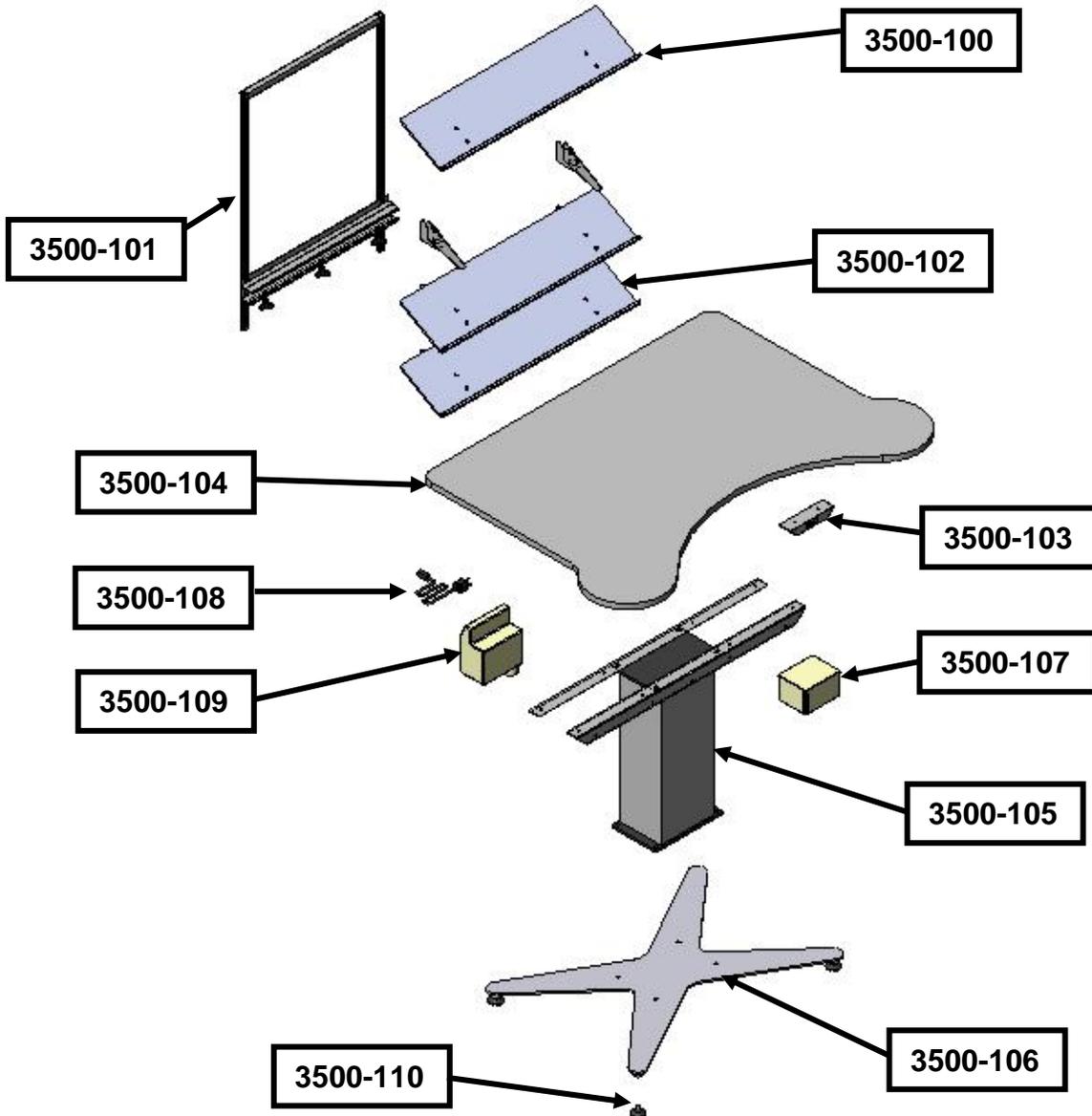

#	DESCRIPTION
3500-100	Tablette en plastique transparent
3500-101	Support à tablettes
3500-102	Tablette complète (tablette et équerres ajustables)
3500-103	Boutons de contrôle et fil
3500-104	Surface de travail
3500-105	Colonne électrique DL2
3500-106	Base métallique noire
3500-107	Batterie rechargeable
3500-108	Câble d'alimentation électrique 110V
3500-109	Boîte de contrôle avec chargeur intégré
3500-110	Patte de nivellement 3/8"